

Förbereda MicroSD-kortet

Innan du kan använda anteckningsfunktionen så måste du sätta i ett MicroSD-kort i Focus-displayen eftersom filer du skapar sparas direkt på kortet. BRF-böcker kommer också att behöva kopieras till kortet för att kunna läsas i anteckningsfunktionen. Focus stödjer MicroSD-kort på upp till 32 GB. För att sätta i ett MicroSD-kort, gör följande:

VARNING: Du ska under inga omständigheter försöka sätta i kortet på något annat sätt än så som beskrivs. Skador på kortet eller Focus Blue kan bli resultatet om kortet inte är rätt positionerat när det sätts i.

1. Försäkra dig om att Focus Blue är avslagen.
2. Vrid displayen så att vänstra sidan är vänd mot dig. MicroSD-facket är en smal öppning placerad till höger om Av/påknappen, under stötdämparen.
3. Håll kortet så att fingernagelgreppet (den upphöjda kanten som används för att få tag i och ta ut kortet) pekar mot dig och är vänt neråt. Du känner också en lite utskjutande del på den vänstra sidan samt en bortklippt fyrkant i det övre vänstra hörnet. Dessutom bör den tryckta etiketten på kortet vara vänd neråt.
4. Skjut in kortet i facket tills det klickar på plats.

När kortet väl är isatt, gör följande för att ladda ner och överföra anteckningsfunktionens hjälpfiler till kortet så att du kan komma åt dokumentationen direkt på din display inifrån anteckningsfunktionen:

1. Använd länken nedan för att ladda ner och spara filen Focus5-SDCard.exe på en plats på din dator där du enkelt kan hitta den, till exempel din Hämtade filer-mapp.
<http://files.freedomscientific.com/WebFiles/Focusblue/Focus5-SDCard.exe>
2. Leta reda på filen och kör den. Du tillfrågas var du vill packa upp innehållet i filen. Tryck **ENTER** för att acceptera standardplatsen. En mapp kallad fsi skapas i mappen Hämtade filer.
3. På Focus, tryck och håll inne **Vänster panoreringsknapp** medan du samtidigt slår på displayen. Anslut Focus till din dator med hjälp av den medföljande USB-kabeln och displayen kommer att kännas igen som en flyttbar USB-lagringsenhet.

Observera: I fall du använder en skärmläsare såsom JAWS via USB så rekommenderas det att du slår på talet eller använder en Bluetooth-



anslutning eftersom punktskrift för närvarande inte kommer att fungera via USB när Focus används som en lagringsenhet. Du kommer inte heller att kunna använda anteckningsfunktionen när du är i detta läge.

4. På din dator, navigera till mappen fsi och tryck **CTRL+C** för att kopiera hela mappen och dess innehåll.
5. Navigera till och öppna USB-enheten för att visa innehållet på MicroSD-kortet och tryck **CTRL+V** för att klistra in fsi-mappen på roten på kortet.
6. När mappen väl är överförd, tryck på **PROGRAM-tangenten** på din dator när fokuset är på USB-enheten och välj Mata ut.
7. Slå av och på Focus igen och tryck sedan samtidigt **Menyknappen** och bokstaven **N (PUNKTERNA 1-3-4-5)**. Anteckningsfunktionen öppnas med en tom fil där du omedelbart kan börja skriva in text. För att öppna hjälpfilen, tryck samtidigt **Höger Skifttangent** och bokstaven **H (PUNKTERNA 1-2-5)**.

