

Manual Looky 5



Version 1.5

Innehåll


1. Introduktion.....	4
2. Generell beskrivning – Looky 5.....	4
3. Avsedd användning	4
4. Säkerhet och underhåll.....	5
5. Installation av Looky 5	5
6. Laddningsinstruktioner	5
7. Skötsel av batterihandtaget	6
8. Det vikbara handtaget	6
9. Slå på / av Looky 5	7
10. Fokusera med Looky 5	7
11. Avståndskamera	7
12. Stänga av och slå på belysningen	7
13. Skärmlägen	7
14. Zoom.....	8
15. Frys bilden	8
16. Magnetiska linjer	8
17. Menyn i Looky 5	9
17.1 Menyn för ljud, ljusstyrka och referenslinje	9
17.1.1. Ikonen Ljud.....	9
17.1.2. Ikonen Ljusstyrka	9
17.1.3. Ikonen Referenslinje	9
17.2. Menyn för skärmläge och batteri	10
17.2.1. Ikonen Batteri	10
17.2.2. Skärmläge.....	10
18. Bildutgång.....	10
19. Skriva med Looky 5.....	10

20. Gömd meny	10
21. Felsökning	11
22. Återvinn Looky 5 eller batteri	13
23. Garanti	13
24. Bestämmelser	13

1. Introduktion

Grattis till ditt köp av Looky 5! I den här manualen kommer du hitta detaljerad information om alla funktioner som finns i Looky 5. Läs denna manual noggrant innan du börjar använda din Looky 5. Om du fortfarande har några frågor efter att du läst manualen är du välkommen att kontakta din återförsäljare.

2. Generell beskrivning – Looky 5

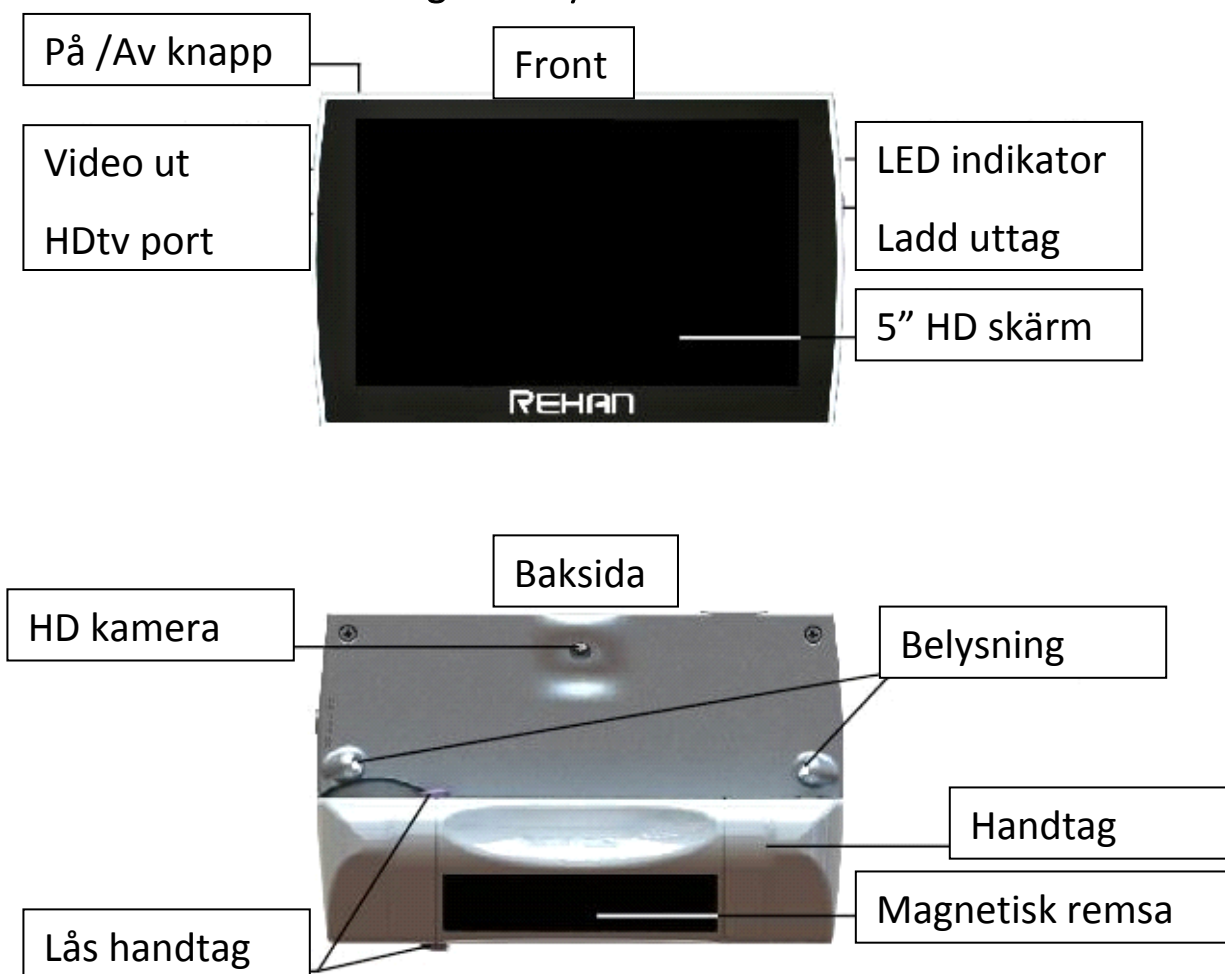

3. Avsedd användning

Looky 5 är endast avsedd att användas för förstoring av text, fotografier och andra objekt. Om enheten används på något annat sätt än vad den är avsedd för, gäller inte CE-märkningen.

OBS! Enheten får inte under några som helst omständigheter repareras eller underhållas av någon annan än en av tillverkaren godkänd tekniker. Om enheten repareras av någon som inte är godkänd av tillverkaren kommer garantin att ogiltigförklaras.

4. Säkerhet och underhåll

Följ dessa säkerhets- och skötselinstruktioner innan du börjar använda enheten:

- Skydda enheten och dess batteri från smuts, regn, sand och extrema temperaturer såsom element, direkt solljus etc.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, rödsprit eller slipmedel. Detta kan förstöra enheten eller dess pekskärm.
- Använd endast tillbehör som tillverkaren tillhandahåller eller tillbehör som godkänts av tillverkaren.
- Släng aldrig batterier i eld. Trasiga batterier och laddare betraktade som miljöfarliga och måste lämnas in på din lokala återvinningsstation.
- Notera att användning av ett skärmskydd kan påverka funktionen hos pekskärmen.

5. Installation av Looky 5

Sätt i batterihandtaget genom att skjuta in batterihandtaget på kontakten tills du hör att handtaget klickar på plats. Detta handtag fungerar även som Looky 5s handtag.

För att byta batteri trycker du in de två lila knapparna på handtaget och skjuter sedan in det nya.

Ladda batterihandtaget innan du använder enheten. Läs noga instruktionerna för laddning.

6. Laddningsinstruktioner

Anslut laddaren till ett vägguttag och till laddningskontakten på Looky 5.

- LED-indikatorn lyser konstant: Batteriet laddas.
- LED-indikatorn är släckt: Batteriet är fulladdat.
- LED_indikatorn blinkar: Fel / batteriet är trasigt

Ladda enheten i en väl ventillerad miljö. Ta ur enheten ur väskan och placera den inte i närheten av ett element eller i direkt solljus.

När Looky 5 är helt urladdad hörs en hög ton som tonas bort.

7. Skötsel av batterihandtaget

- Om du planerar att inte använda Looky 5 på ett tag, ta bort handtaget från enheten. Detta ökar livslängden på batteriet.
- Batterier är känsliga för överladdning. Därför rekommenderas att ladda batteriet endast när det är helt slut.
- Laddningsbara Litium-Ion-batterier laddas ur automatiskt beroende på temperaturförhållande, därför bör du inte lämna batterier i t.ex en parkerad bil som står i solen.
- Nya Litium-Ion-batterier måste laddas och laddas ur ett par gånger innan de når maximal kapacitet.
- Ladda Litium-Ion-batterier minst en gång var 9:e månad.
- Livslängden hos ett Litium-Ion-batteri är i genomsnitt 300 laddningscykler men detta beror på användning. Den totala batteritiden minskar sakta mellan laddcyklerna.

8. Det vikbara handtaget

Looky 5 har ett vikbart utbytbart handtag som innehåller enhetens batteri. Handtaget kan vridas i ett flertal olika positioner och i helt utfällt läge kan Looky 5 användas som ett vanligt förstoringsglas. Ju närmare du har objektet, desto större blir objektet på skärmen. Du kan också hålla upp Looky 5 för att se saker på distans, då enheten kan fokusera på allt från 5cm till oändligt avstånd.

Du kan också fälla in handtaget helt, detta gör att du kan ställa enheten på bordet och den kommer då att ha en liten lutning.

Förstoringsgraden blir då ca 8x och detta är bra när du vill ha lite extra stabilitet vid läsning av text.

9. Slå på / av Looky 5

För att slå på Looky 5 trycker du en gång på On/Off-knappen. En stigande ton hörs.

För att stänga av enheten håller du On/Off-knappen nedtryckt i tre sekunder. En sjunkande ton hörs och enheten stängs av.

Om Looky 5 inte upptäcker någon rörelse på skärmen på 3 minuter stängs enheten av. Du kommer då att höra två pip, ett högt och ett lågt.

10. Fokusera med Looky 5

Looky 5 använder sig av en Tryck-För-Fokus-metod för att fokusera kameran på ett speciellt objekt. Peka bara på skärmen där du vill att kameran ska fokusera, så fokuserar kameran på aktuellt område.

11. Avståndskamera

Looky 5 har en funktion för att fokusera objekt på avstånd. Du kan fokusera på objekt från 5cm och uppåt. Håll bara upp Looky 5 och peka på objektet på skärmen så fokuserar kameran på detta.

12. Stänga av och slå på belysningen

För att stänga av LED-belysningen på Looky 5 pekar du och håller fingret i mitten på skärmen i tre sekunder. En pipsignal hörs som indikerar att belysningen är avstängd.

För att slå på belysningen pekar du igen i mitten på skärmen i tre sekunder. En ton hörs som indikerar att belysningen är påslagen.

13. Skärmlägen

Genom att svepa med ett finger uppifrån och ner (och vice versa) kan du växla mellan olika färglägen.

14. Zoom

För att öka och minska förstoringen sveper du med ett finger uppåt eller nedåt längs höger eller vänster sida på skärmen.



För att förstora sveper du uppåt och för att minska förstoringen sveper du nedåt.

15. Frys bilden

Genom att trycka ett kort tryck på On/Off-knappen fryser du bilden på skärmen. Tryck igen för att återgå till normalt läge igen.

När bilden är frusen kommer belysningen på baksidan att tonas ner för att spara batteri.

När bilden är frusen kan du använda två fingrar för att panorera i bilden.

16. Magnetiska linjer

På den nedre sidan av handtaget finns ett magnetiskt fält som kan användas tillsammans med det magnetiska underlägget.

Lägg underlägget under pappret där du vill läsa. Lägg sedan pappret på underlägget och placera Looky 5 ovanpå detta. Nu kommer de magnetiska linjerna att hjälpa dig att hålla raden.

17. Menyn i Looky 5



Genom att svepa med tre fingrar uppåt eller nedåt på skärmen kan du få tillgång till olika menyer i Looky 5.

17.1 Menyn för ljud, ljusstyrka och referenslinje

Genom att svepa uppåt med tre fingrar hittar du menyn för ljud, ljusstyrka och referenslinjen. Menyn dyker upp på skärmens nedre halva. Dessa inställningar sparas automatiskt när Looky 5 stängs av.

17.1.1. Ikonen Ljud

Med den här ikonen kan du slå på eller av enhetens ljud.

	Ljud På
	Ljud av

17.1.2. Ikonen Ljusstyrka

Med den här ikonen kan du ändra ljusstyrkan på skärmen. Det finns fem lägen att välja mellan.



17.1.3. Ikonen Referenslinje

Välj den här knappen om du vill ha en vertikal eller en horisontell referenslinje på skärmen.

17.2. Menyn för skärmläge och batteri

Genom att svepa uppifrån och ner med tre fingrar hittar du menyn för skärmläge och batteri i den övre halvan av skärmen.

17.2.1. Ikonen Batteri

Ikonen Batteri visar batteristatusen för enheten. Det finns fem ikoner totalt.

17.2.2. Skärmläge

Ikonen Skärmläge ger dig möjlighet att enkelt välja ett läge för skärmen.

18. Bildutgång

Looky 5 kan visa bilden på en extern skärm. Koppla bara in rätt kabel till HDTV-porten på Looky 5.

Se till att den externa skärmen sitter i ett jordat uttag för bästa bildkvalitet.

19. Skriva med Looky 5

Fäll in handtaget till Looky 5 och placera den sedan på pappret du vill skriva på.

20. Gömd meny

För att öppna den gömda menyn håller du On/Off-knappen nedtryckt i minst 4 sekunder. Bläddra bland de olika sektionerna genom att svepa uppifrån och ner. Sveg från höger till vänster för att välja bland andra alternativ.

Avsluta menyn genom att trycka en gång på strömknappen.

Slå på eller av färger i Skärmläge

I den här sektionen kan du bestämma vilka färger som ska vara tillgängliga när Looky 5 används.

Notera dock att oavsett vilka färgkombinationer som valts eller plockats bort, kan dessa ändå väljas i menyn för skärmlägen. Se kapitel 17.1.2.

Tryck på kryssrutan vid det objektet som du vill ta bort.

OBS! Fullfärgsläget går inte att ta bort.

21. Felsökning

Om följande tabell inte löser ditt problem, var god kontakta din lokala distributör.

1	Ingen bild eller mörk/suddig bild	Ändraskärmläget till Färg.
2	Looky 5 kan inte slås på	Tryck på On/Off-knappen. Ta ur och sätt i batteriet. Byt ut batterihandtaget.
3	Looky 5 stängs av efter några minuter och en ton hörs	Looky 5 stängs av automatiskt om ingen rörelse upptäcks på skärmen på tre minuter.
4	Looky 5 stängs av efter några minuter med en hög ton som	Ladda batteriet. Byt ut batterihandtaget.

tonas ut	
----------	--

Specifikationer

Mått och vikt:

Mått (b x h x d)	131 x 75 x 32
Vikt	300 g (Inkl batteri)
Skärmstorlek	5"
Övriga specifikationer	Hög ljusstyrka
Kameratyp	Touch-teknologi
Minsta förstoringsgrad	2x
Högsta förstoringsgrad	20x
Fokus	5cm och uppåt
Batteri	Utbytbart (innuti batterihandtag)

Adapter

Användningsvillkor

Temperatur	+5°C till +35°C
Luftfuktighet	<70% (ingen kondensering)

Användnings- och laddningstid

Användning	Upp till 3 timmar
Laddningstid	Upp till 5 timmar

Innehåll i kartongen

- Looky 5
- Laddare
- Fodral
- Magnetunderlägg
- Användarmanual
- HDTV-kabel
- SDTV-kabel
- Rengöringsduk

22. Återvinn Looky 5 eller batteri



Denna symbol i form av en överkryssad soptunna innebär att produkten inte får slängas tillsammans med övrigt hushållsavfall. Kontrollera lokala föreskrifter för mer information.

23. Garanti

Denna produkt omfattas av din leverantörs garantiförordningar. För mer information om garantin kontakta din lokala återförsäljare.

24. Bestämmelser

Produkter som innehar CE-märkning omfattas av ECC-direktiven (2004/108/53), samt lågvoltsdirektivet (2006/95/53) utfärdat av Commission of the European Community.

Överensstämmelse med dessa direktiv innebär överensstämmelse med följande standarder:

EMC: EN 55022; EN 55024 FCC: del 15 klass B, Säkerhet: EN 60950.