

Användarmanual Acuity Speech Läskamera uppläsning



Version 1.8



Innehåll

Inledning	4
Installation, säkerhet och underhåll	4
Installation	5
Justera skärmens höjd och lutning	5
Transportera Acuity	5
Tips vid användning	6
Starta enheten	7
Skärmväxlingsfunktion	7
Läsbord	7
Bromshandtag	8
Acuity-Läskamera – kontroller	9
Visningslägen (Artificiella färger)	9
Zooma	9
Blockera autofokus	10
Ljusstyrka	10
kontrast	10
Vitbalans	11
Avancerade läshjälpmedel	11
Meny – Avancerade inställningar Läskamera	12
Visningslägen	13
Beskriv zoom	14
Ljudåterkoppling	14
Förstoringsindikator	14
Kom ihåg zoom	15
Läshjälpmedel	15



Uppdateringsfrekvens.....	15
Kontrast	15
Vitbalans	15
Fabriksåterställning.....	16
Acuity-talläget	17
Livläget	17
Upptäck stycken	18
Enkel Kolumn.....	18
Galleri	18
Språkinställning.....	18
Läsvy	19
Zoomning och panorering	19
Meny.....	20
Röstmenyn	20
Läslägesmenyn.....	21
Dokumenthanteringsmenyn	23
Inställningsmenyn	23
Dokumentväljaren	24
Galleri	25
Fjärrkontroll	26
Föreskrifter	26
WEEE & RoHS-direktiv	27
Garantiinformation	27
Specifikationer	28
Användningsvillkor	28



Inledning

Grattis till din Acuity Speech; en högkvalitativ förstöringskamera avsedd för skrivbordet och speciellt användarvänlig med dess pekskärmsinmatning.

Läs denna manual ordentligt innan du börjar använda din Acuity Speech. Information i denna manual gäller Acuity Speech.

Denna manual innehåller instruktioner om hur enheten behöver installeras samt beskriver alla funktionerna hos Acuity Speech.

Installation, säkerhet och underhåll

Kartongens innehåll:

- Acuity Speech-kartongen innehåller följande:
- Acuity Speech
- Strömadapter
- Manual
- HDMI-kabel (endast för Acuity Speech med skärmväxlingsfunktion)
- Fjärrkontroll samt fjärrkontrollens mottagare (valfritt tillbehör)



Öppna aldrig enheten själv, då upphör garantin. Om du misstänker att enheten är i behov av service eller reparation, kontakta din leverantör.




Installation

Acuity kommer att levereras till dig ihopsatt. Allt du behöver göra är att skjuta skärmen uppåt till den höjd du föredrar samt ansluta adaptern till ett vägguttag och slå på enheten.

Justera skärmens höjd och lutning

Skärmens lutning kan justeras genom att ta ett fast tag i skärmen på vänster och höger sida och luta skärmen till den position du föredrar.

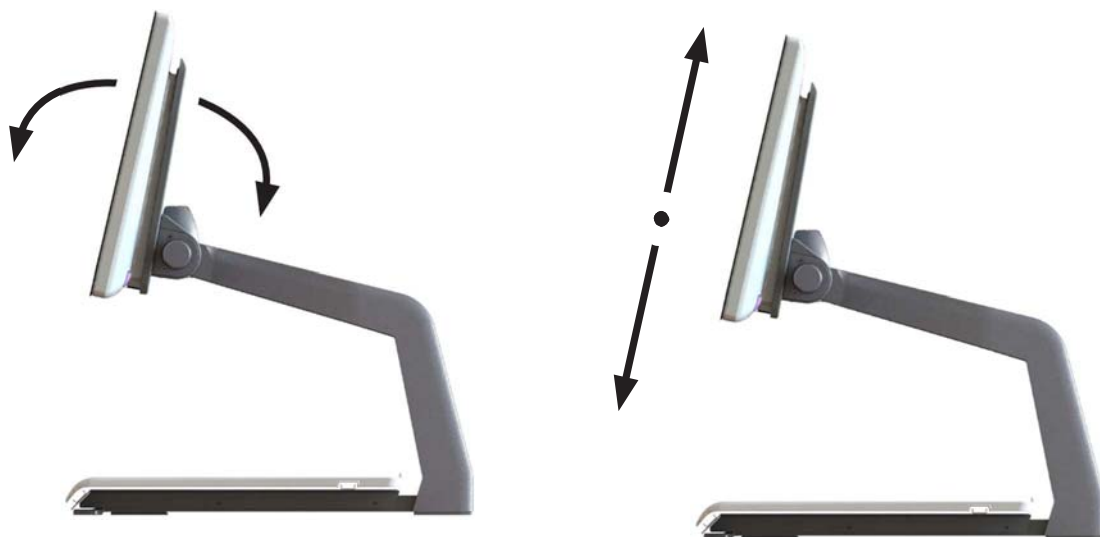

Justera Skärmens lutning Justera skärmens höjd

Transportera Acuity

I fall enheten behöver transporteras är det tillrådligt att frakta den i dess originalkartong för att undvika potentiella skador på enheten.




Tips vid användning

- Undvik direkt solljus på skärmen samt läsbordet.
- Var försiktig när du hanterar läsbordets rörliga delar.
- Acuity kräver lite eller inget underhåll. Om du vill rengöra enhetens utsida, använd endast en torr trasa. Användning av aggressiva rengöringsmedel såsom alkohol, aceton eller andra kemiska substanser är förbjudet.
- Använd inte Acuity som stöd när du går, sätter dig ner eller ställer dig upp.
- Stäng av enheten om du inte avser att använda den.
- Försäkra dig om att Acuity är placerad i ett väl ventilerat rum.
- Placera Acuity på en stabil yta för att hindra den från att falla.
- Använd din Acuity endast inomhus. Utsätt inte enheten för extrema temperaturförändringar eller fukt. Placera inte din Acuity i närheten av en värmekälla.
- Använd endast de medföljande kablarna och anslut adaptern till ett vägguttag.
- Säkerställ att Acuity placeras på ett avstånd av minst 10 cm från kanten på bordet.



Starta enheten

På-/avknappen hos Acuity Speech är belägen nere till höger på baksidan av skärmen. För att starta upp eller stänga av enheten, håll knappen inne i 2 sekunder tills du hör uppstarts- eller avstängningsljudet.

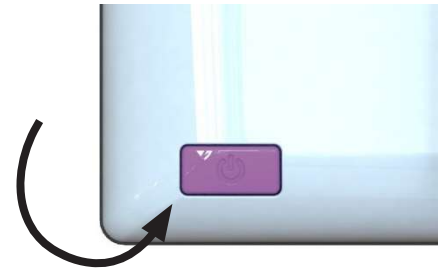

Skärmväxlingsfunktion

Tryck på på-/avknappen en gång när enheten är på för att växla mellan de många lägena hos Acuity Speech: Acuity-läskamera, Acuity-talläget och extern källa. Den externa källan är endast tillgänglig när en HDMI-kabel är ansluten till en av HDMI-portarna på baksidan av Acuity Speech samt till en extern enhet.

Läsbord

Acuity har ett läsbord på vilket du kan placera ditt läsmaterial. Läsbordet kan flyttas från vänster till höger samt framåt och bakåt.



Bromshandtag

Framför läsbordet på Acuity hittar du ett enkelt bromshandtag med vilket du kan kontrollera läsbordets rörelser. Handtaget har 4 positioner:

- Vänster = Läsbordet kan röra sig fritt.
- Mitten Vänster = Fri rörlighet från vänster till höger. Läsbordet kan justeras 5 millimeter framåt och bakåt.
- Mitten Höger = Fri rörlighet från vänster till höger, rörelser framåt och bakåt är blockerade.
- Höger = Alla läsbordets rörelser är blockerade.



Acuity-Läskamera – kontroller

Kontrollerna för Acuity-läsläget återfinns nedanför skärmen och består av beröringskänsliga ytor:



Visningslägen (Artificiella färger)

Tryck

Tryck på denna ikon för att bläddra mellan alla tillgängliga visningslägen.



Tryck och håll


Tryck och håll på Display Mode-ikonen för att snabbt växla mellan det högkontrastläge du senast använde och fullfärgsläget.

Svep

Svep från höger till vänster för att gå till nästa visningsläge i ordningen. Svep från vänster till höger för att gå till föregående visningsläge i ordningen.

Zooma

Tryck eller håll på minusikonen för att zooma ut. Tryck eller håll på plusikonen för att zooma in. Förstoringsnivån visas på skärmen.

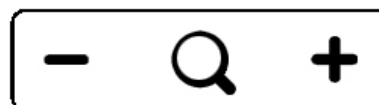

Blockera autofokus


Genom att trycka på Förstoringsikonen kommer enheten att fokusera om på ditt läsmaterial och blockera autofokus. Tryck på en zoomningsknapp för att häva blockeringen av autofokuset.



Ljusstyrka

Tryck


Genom att trycka på den här ikonen kan du bläddra mellan 5 ljusnivåer.

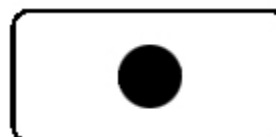

kontrast

Svep och håll

Svep på denna ikon från vänster till höger och håll ditt finger på den högra sidan av den rundade rektangeln för att gradvis öka kontrasten.

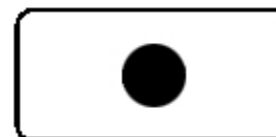

Svep på denna ikon från höger till vänster och håll ditt finger på den vänstra sidan av den rundade rektangeln för att gradvis minska kontrasten.


Kontrasten kan endast justeras i högkontrastlägena, inte i fotolägena.

Observera att ljusstyrka och kontrast inte kan justeras när läshjälpmiddel används.



Vitbalans

Svep på denna ikon från vänster till höger och håll ditt finger på högra sidan av den rundade rektangeln för att gradvis ändra vitbalansen för mer kallare, blåare bild.

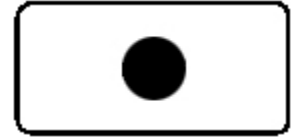

Dra denna ikon från höger till vänster och håll ditt finger på vänstra sida av den rundade rektangeln för att gradvis ändra vitbalansen till mer varm, orange bild.

Vitbalansen kan bara justeras i fotolägen, inte i högkontrastlägen.

Avancerade läshjälpmiddel**Tryck och håll**

Tryck och håll på denna ikon för att gå in i menyn Avancerade läshjälpmiddel. Följande läshjälpmiddel är tillgängliga:



Horisontell Kuliss



Vertikal Kuliss



Horisontell linje



Vertikal linje



Svep uppåt eller neråt över denna ikon för att välja det önskade läshjälpmedlet som krävs. Varje läshjälpmedel har 5 inställningar som indikeras med en siffra som visas i ikonerna.

När väl det begärda läshjälpmedlet är valt, tryck på den här ikonerna för att välja den önskade inställningen för läshjälpmedlet.

För att ändra inställningsvärdet kan du trycka på denna ikon för att gå till nästa nivå eller så kan du svepa från vänster till höger.

För att ändra till ett annat läshjälpmedel, svep uppåt eller neråt över denna ikon och tryck sedan på den för att ställa in önskad nivå för det valda läshjälpmedlet. För att gå ur menyn Avancerade läshjälpmedel, tryck och håll inne denna ikon i 2 sekunder. Läshjälpmedlet kommer nu att försvinna från skärmen.

Meny – Avancerade inställningar Läskamera

Acuity Speech innehåller en avancerad meny med vilken du kan (in)aktivera vissa funktioner för Acuity-Läskamera. Du kan komma åt den avancerade menyn genom att säkerställa att enheten är avslagen, håll sedan inne på-/avknappen i ungefär 10 sekunder tills du hör ett pip efter uppstartsljudet.

Genom att trycka på Ljusnivåikonen kan du bläddra mellan flera skärmar med valbara alternativ. Tryck på plusikonen på zoomningsknappen för att markera vilket läge du vill ändra. Du ser vilken funktion som är




markerad genom den vita rundade rektangeln runt den. Tryck på Förstoringsikonen) för att aktivera/inaktivera ditt val.


För att spara alla ändringar eller för att avsluta utan att göra några ändringar, slå av enheten, och slå på den igen.

Visningslägen

På första skärmen kan du välja huruvida du vill att fotoläget ska ha realistiska färger eller färger med hög mättnad samt vilket högkontrastläge som du vill ska vara tillgängligt för Acuity-Läskamera.

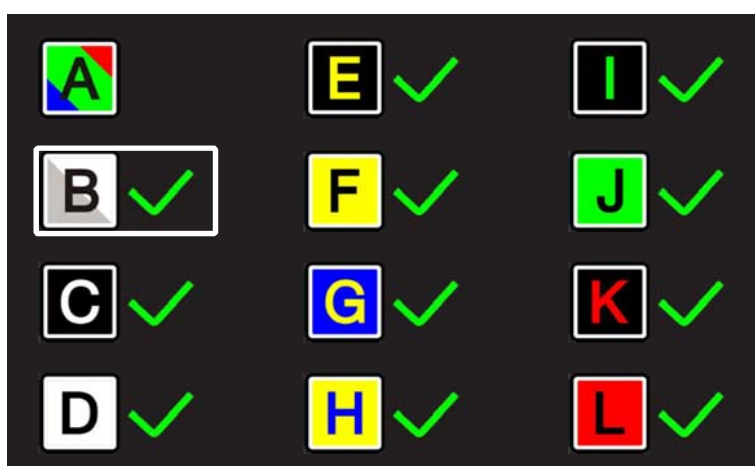


Den andra skärmen visar avancerade funktioner.

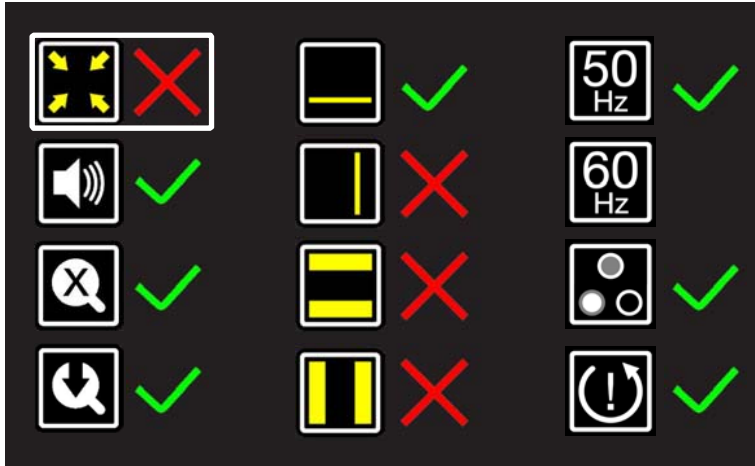

Beskär zoom

Funktionen Beskär zoom beskär bilden på skärmen till 50 % så att en förstöringsnivå på 1x kan åstadkommas.

Denna funktion är av som standard.

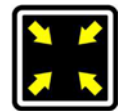

Ljudåterkoppling

När denna funktion är på hör du ett pip när du ändrar en funktion. Denna funktion är på som standard.



Förstoringsindikator

När du zoomar in eller ut dyker en förstöringsindikator upp i övre vänstra hörnet som visar vilken förstöringsgrad det blir. Denna funktion är på som standard.




Kom ihåg zoom

När denna funktion är på kommer enheten att gå tillbaka till den senast använda förstoringen i högkontrastlägena och fotoläget, när du växlar till dessa funktioner. Denna funktion är på som standard.



Läshjälpmedel

Detta låter dig slå på eller av alla läshjälpmedel var för sig. Dessa funktioner är på som standard.

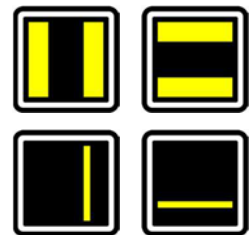

Uppdateringsfrekvens


Beroende på var du befinner dig kommer elnätets frekvens att vara 50 eller 60 Hertz.

Genom att välja rätt inställning kommer du att dämpa flimmer som förorsakas av omgivande ljus. Denna funktion är som standard inställd på 50 Hz.



Kontrast

Med denna funktion kan du slå på eller av den manuella kontrastjusteringen. Denna funktion är på som standard.

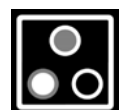

Vitbalans

Välj om du manuellt ska kunna justera vitbalansen i fotoläge, Denna funktion är normalt avstängd.



Fabriksåterställning

Genom att aktivera denna funktion kommer du att återställa enheten till fabriksinställning.



Detta gäller alla avancerade funktioner samt de senast använda förstoringsinställningarna.




Acuity-talläget

När du växlar till Acuity-talläget (Ett tryck På/Av knappen) efter att enheten har slagits på så kommer du att se ett timglas på skärmen. Detta betyder att enheten startar upp texttolkningsfunktionerna.



Liveläget

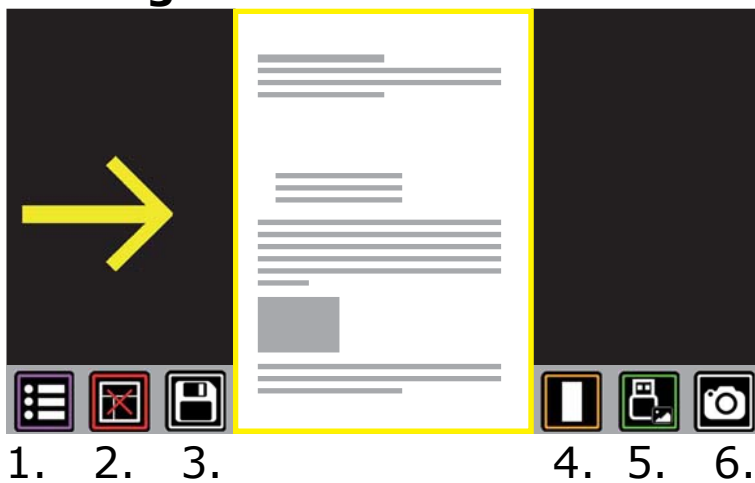

När enheten startar upp i Acuity-talläget så visar den texten "Scan Screen" (skannings-skärm). I liveläget kommer du att se en vy i A4-storlek över läsbordet. Liveläget har dessa kontroller:

1. Meny
2. Slå på eller av upptäck stycken
3. Spara stillbild av liveläge
4. Slå på eller av enkel kolumn
5. Öppna Galleri
6. Läs upp sida



Upptäck stycken

Genom att trycka på denna ikon kan du slå på eller Av, upptäck stycken. När detta är på och du trycker på knappen Läs upp sida så kommer du att bli visad en översikt över sidan med styckena markerade. Du kan då välja det stycke som du vill att Acuity Speech ska börja läsa. När detta är av kommer Acuity Speech att betrakta hela sidan som ett enda textblock och börja läsa omedelbart.



Enkel Kolumn

Genom att trycka på denna ikon kan du slå på och av, Enkel kolumn. När denna är aktiverad och du trycker på knappen Läs upp sidan, kommer sidan presenteras som en kolumn, även om text består av flera.



Galleri

Bilder som sparats på ett USB minne (.jpg och .png) Kan presenteras i Galleriet. Bilden kan roteras.




Språkinställning

Med hänsyn till det språk som används mest i texten på sidan samt språken som ställts in i menyn kommer dokumentet att tolkas på ett språk. All text på sidan kommer att läsas upp på det språket.



Läsvy

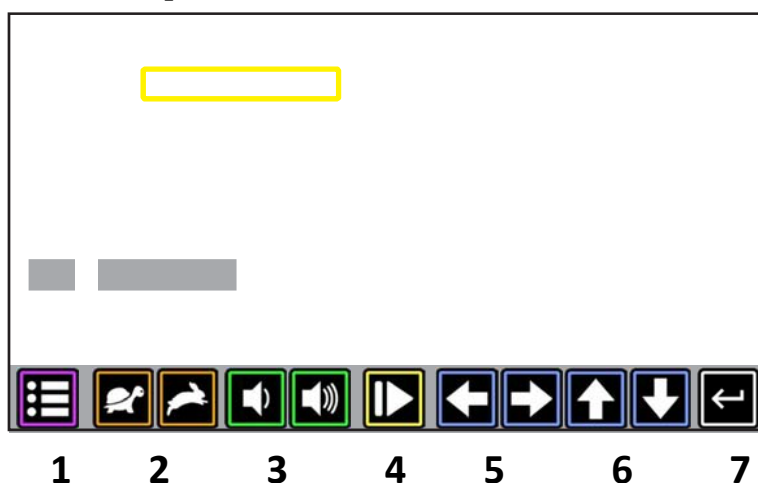


När du börjar läsa i läsvyn kommer du att se detta gränssnitt. Det kan anpassas i menyn. Läsvyn har följande kontroller:

1. Meny
2. Läsastighet (långsammare eller snabbare)
3. Volym (volym ner/upp)
4. Pausa/fortsätt
5. Hoppa över ord (bakåt/framåt)
6. Hoppa över stycke) (bakåt/framåt)
7. Återgå till föregående vy

Zoomning och panorering

I läsläget är det möjligt att zooma in och ut på det skannade dokumentet med zoomningsknapparna nedanför skärmen. Du kan panorera i den zoomade bilden genom att förflytta ditt finger över skärmen och dra i det skannade dokumentet.

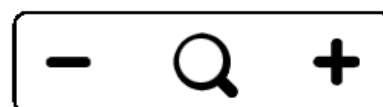


Meny

Acuity-talläget har en meny i vilken du kan ändra viss funktionalitet för Acuity-talläget. Du kan komma åt den avancerade menyn genom att trycka på menyknappen som visas till höger. Du kan välja bland flera sidor i menyn till vänster för att visa funktionerna som hör till den menyn. Knappen Återgå nere till vänster gör att du återvänder till vyn som användes innan.



Röstmenyn

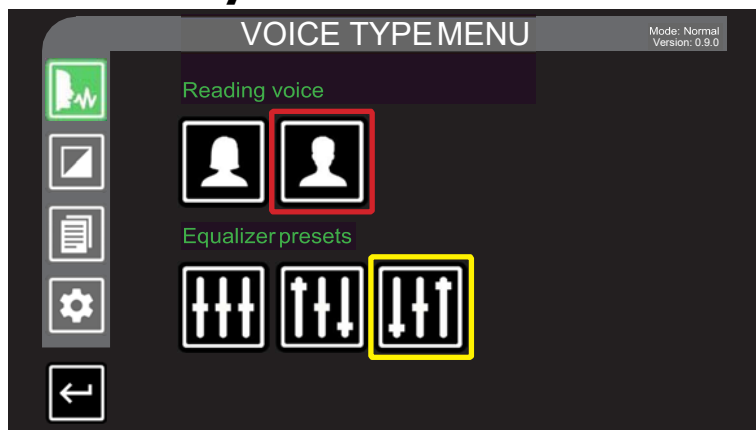


När du öppnar menyn så kommer den att visa följande högst upp till vänster på första sidan: Voice Type Menu. I denna meny finns det två inställningar. Den översta inställningen är läsrösten: Male (manlig) eller female (kvinnlig). Den andra inställningen är equalizerinställningen: Flat (exakt), bass boost (förstärkt bas) eller treble boost (förstärkt diskant).



Läslägesmenyn

Den andra sidan med alternativ visar de alternativ som gäller för läsvyn. Alla alternativen är inte tillgängliga i alla vylägen.

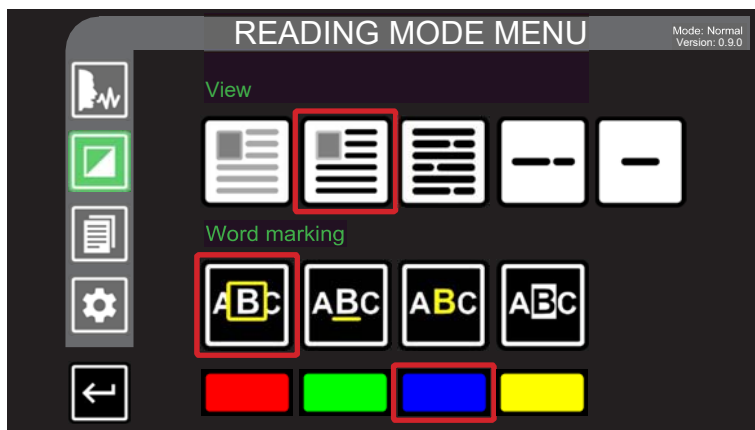

Det första alternativet låter dig välja hur du vill visa den tolkade texten:

1. Normal text så som den är inskannad från sidan.
2. Den tolkade texten kommer att visas som svart text på vit bakgrund, visad ovanför originalsidan.
3. Den tolkade texten kommer att visas som svart text på en vit bakgrund.
4. Den tolkade texten kommer att visas som en rullande teleprompter med vit text på en svart bakgrund.
5. Den tolkade texten kommer att visas ord för ord som vit text på en svart bakgrund.

Det andra och tredje alternativet gäller ordmarkeringen för ordet som Acuity Speech för närvarande läser upp.

Det andra alternativet har 4 alternativ:

1. En färglagd rektangel visas runt det nuvarande ordet.



2. Det nuvarande ordet blir understruket med en färgad linje.
 3. Bokstäverna i det nuvarande ordet blir färglagda.
 4. Bakgrunden för det nuvarande ordet blir färglagd.
- Det tredje alternativet låter dig välja färgen på ordmarkeringen.



Dokumenthanteringsmenyn




Dokumenthanteringsmenyn visar alla alternativ för de dokument du har sparat.

Den har två alternativ:

- Det första alternativet sparar det nuvarande dokumentet.
- Det andra alternativet öppnar dokumentväljaren.

Inställningsmenyn

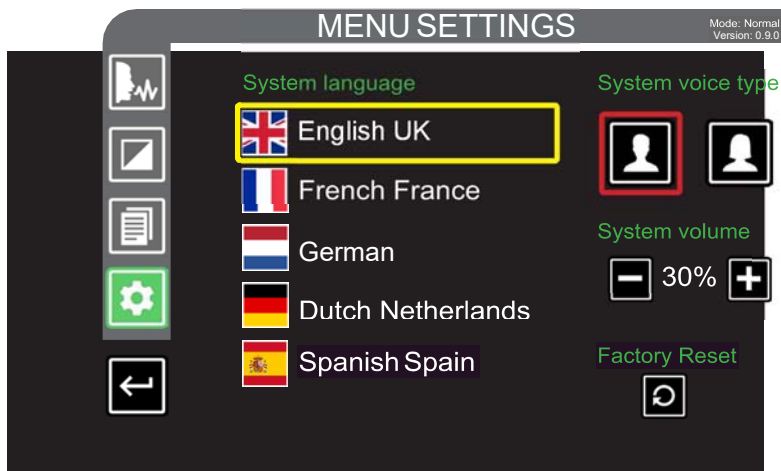


På sista sidan i menyn finns de alternativ som gäller den generella användningen av enheten:



- Systemspråket kan ändras genom att trycka på språkets flagga eller text. Det första språket kommer att användas som språk i systemmenyerna. Du kan välja 5 språk som kan tolkas av Acuity Speech.
- Systemrösten och systemvolymen gäller för talet samt ljuden du hör när du ändrar inställningar, volym eller läshastighet

Factory reset (fabriksåterställning) återställer alla funktioner i menyn och raderar alla sparade dokument!

Dokumentväljaren

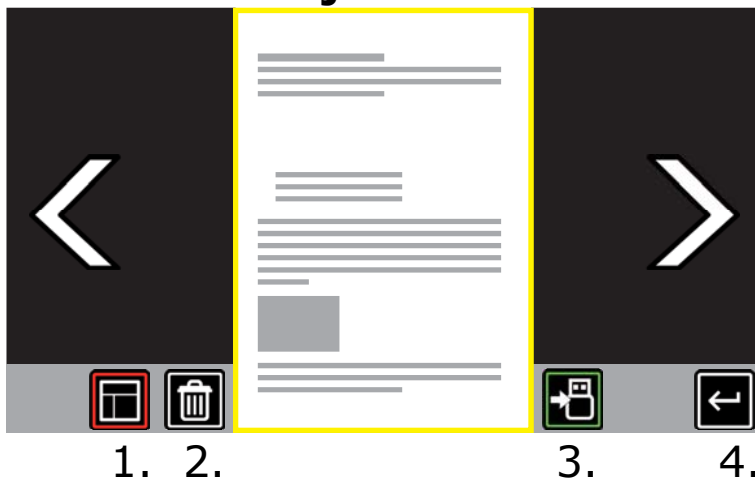


Dokumentväljaren visar alla dokument du har sparat. Tryck på dokumentet med gul kant runt för att börja läsa. Tryck på pilarna för att växla mellan sparade dokument eller använd kontrollerna längst ner på skärmen för följande funktioner:

1. Slå på eller av upptäck stycken.
2. Radera dokument (tryck på det gröna krysset för att bekräfta eller det röda korset för att avbryta raderingen av dokumentet).
3. Spara dokument på USB enhet, ett tangentbord visas upp, dokument kan namnges upp till 14 tecken.



4. Återgå till den föregående menyn.

Galleri

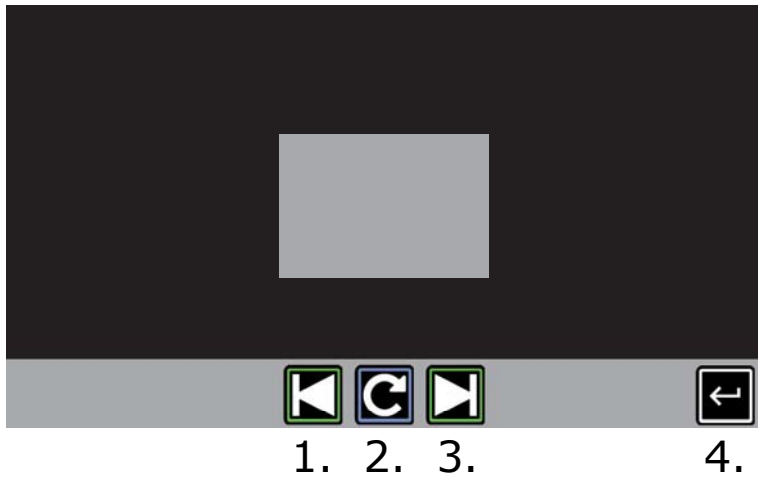

Bilder som sparats på ett USB minne (.jpg och .png)
Kan presenteras i Galleriet.

1. Föregående bild.
2. Roterar bilden 90 grader medurs.
3. Nästa bild.
4. Återgå till föregående meny.



Fjärrkontroll



Acuity kan användas tillsammans med en Bluetooth-ansluten trådlös fjärrkontroll. Denna fjärrkontroll säljs separat. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Föreskrifter

Produkter med CE-markering överensstämmer med EMC-direktiv 2014/30/EC samt Low Voltage-direktivet 2014/35/EU utfärdat av EU-kommissionen.

Överensstämmelse med dessa direktiv inbegriper överensstämmelse med följande standarder:

Säkerhet: EN62368-1

EMC: EN55022; EN55024

Enheten överensstämmer med FCC del 15 Klass B



WEEE & RoHS-direktiv

WEEE-logotypen (visas till höger) på produkten eller dess litteratur indikerar att produkten inte får kasseras eller slängas tillsammans med dina hushållssopor. För mer information kring kassering av avfall från elektronisk och elektrisk utrustning, återvinning och insamlingsställen, var god kontrollera dina lokala bestämmelser.

**RoHS-överensstämmelse**

Acuity Speech överensstämmer med direktivet Restrictions of the use of certain Hazardous Substances (RoHS).

Garantiinformation

För alla frågor gällande din enhets garanti, var god kontakta din återförsäljare för ytterligare information.

Användning av enheten på annat sätt än vad som beskrivs i denna manual kommer att undanta den från garantivillkoren.



Specifikationer

Storlek:	48x48x65 cm (BxHxD)
Vikt:	17 Kg
Skärmstorlek:	22" Touch
Upplösning:	1920x1080
Förstoring:	2,3-65 X (1x i beskuret läge)
Strömadapter:	12V DC /5A

Användningsvillkor

Temperatur:	+5°C till +50°C
Luftfuktighet:	<70% (ingen kondensering)



REHAN ELECTRONICS
Aughrim Road Carnew
County Wicklow Ireland
www.rehanelectronics.ie



Tel: 010-455 04 00, E-post: info@insyn.se
www.insyn.se

